



## Installationsplan Ausgussbecken APWD 075 APWD 077

---

Lesen Sie **unbedingt** die Gebrauchsanweisung sowie die Servicedokumentation vor Aufstellung - Installation - Inbetriebnahme. Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden an Ihrem Gerät.

de - DE

# Technische Daten

---

## Wasseranschluss

Der Spülkreislauf des Ausgussbeckens ist direkt mit dem Reinigungsautomaten verbunden. Optional ist ein Ausgussbecken mit zusätzlichem Frischwasseranschluss erhältlich. Der zusätzliche Frischwasseranschluss kann an Kaltwasser und Warmwasser erfolgen.

## Abwasser

Abwassertemperatur max.	60 °C
Wandöffnung für Abwasserleitung	90 mm
Mittelpunkt des Wanddurchbruchs, Höhe über Fertigfußboden	0,3 m
Volumenstrom Ablauf kurzzeitig max.	100 l/min

## Standfuß

Anzahl Maschinenfüße	4
Höhenverstellung	0-30 mm
Durchmesser Standfuß	45 mm

## Maße und Gewichte

Höhe	970 mm
Breite	500 mm
Tiefe	600 mm
Tiefe (Variante mit Frischwasseranschluss)	700 mm
Nettogewicht	22 kg
Nettogewicht (Variante mit Frischwasseranschluss)	24,5 kg
Einbringbreite inkl. Transportpalette mind.	800 mm
Einbringtiefe inkl. Transportpalette mind.	740 mm
Einbringhöhe inkl. Transportpalette mind.	1020 mm

## Ausgussbecken Varianten

**Variante ohne Frischwasseranschluss**



**APWD 075** manuelle Spülung

**Variante mit Frischwasseranschluss**



**APWD 077** manuelle Spülung

### Umbausätze zur Steuerung der Ausgussbecken über das Display der Steckbeckenspüler:








- APWD 150 (Anschlusskit für PWD 8545)
- APWD 151 (Anschlusskit für PWD 8541, PWD 8546, PWD 8549)

### Abkürzungen


KW	Kaltwasseranschluss	AW	Abwasseranschluss
WW	Warmwasseranschluss	F	Maschinenfüße

# Abbildungen

## Ausgussbecken ohne Frischwasseranschluss

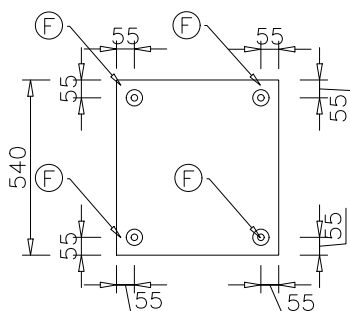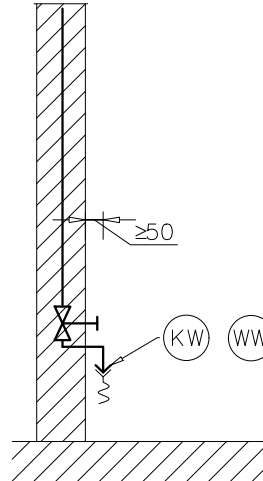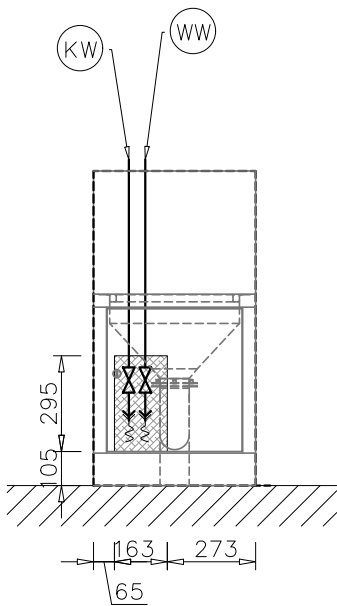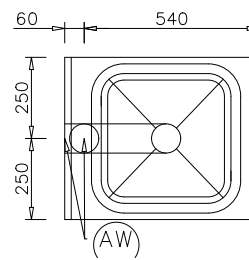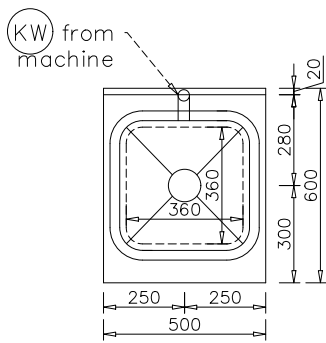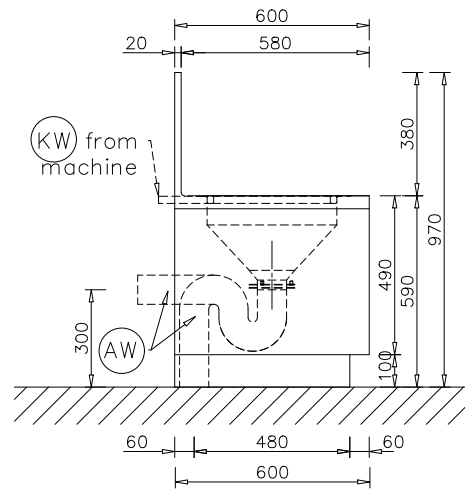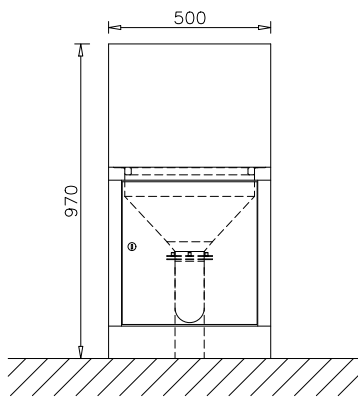

## Ausgussbecken mit Frischwasseranschluss

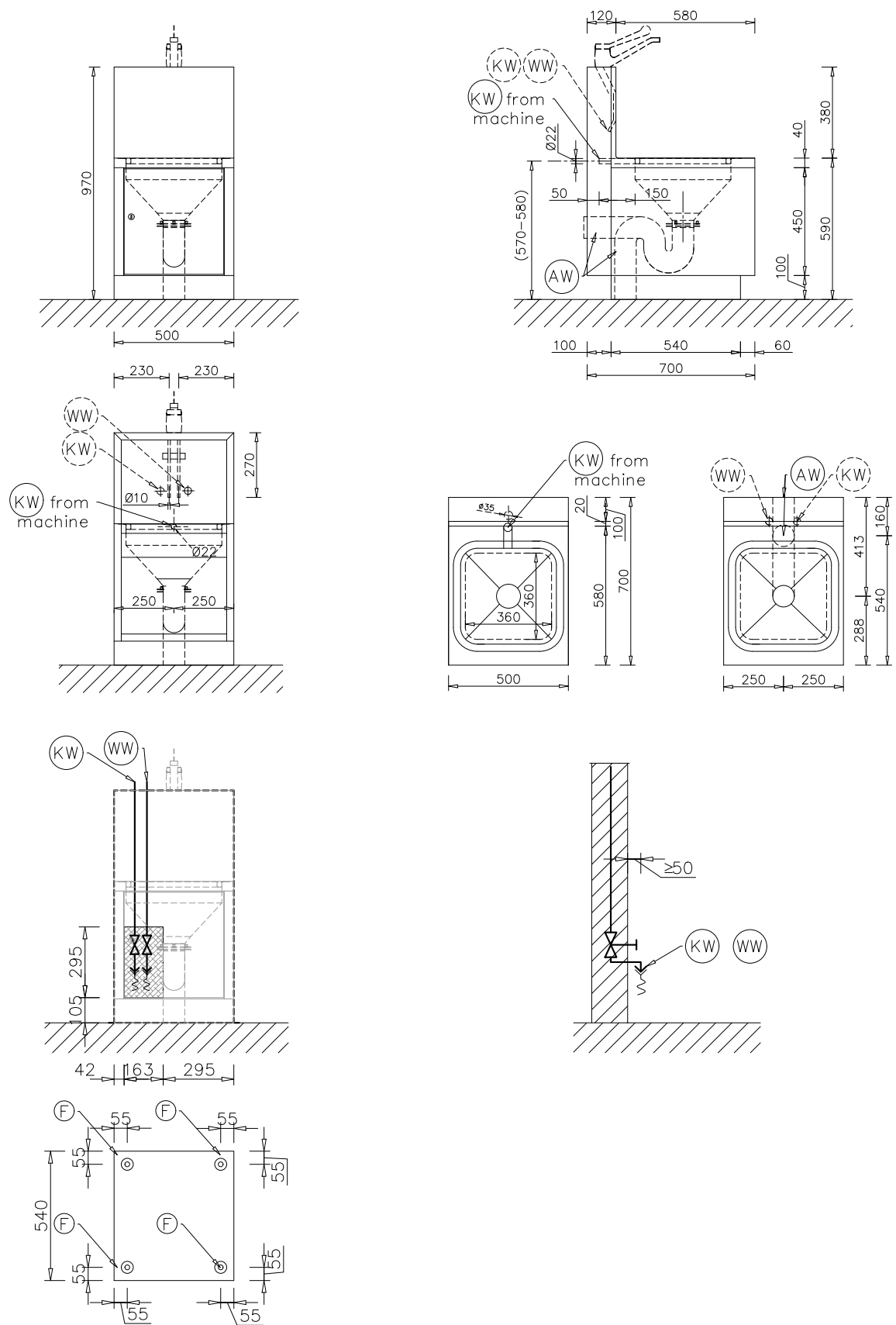

**Deutschland:**

Miele & Cie. KG  
Vertriebsgesellschaft Deutschland  
Geschäftsbereich Professional  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Telefon: 0 800 22 44 644  
Telefax: 0 800 33 55 533  
Miele im Internet: [www.miele.de/professional](http://www.miele.de/professional)

**Österreich:**

Miele Gesellschaft m.b.H.  
Mielestraße 1  
5071 Wals bei Salzburg  
Verkauf: Telefon 050 800 420 - Telefax 050 800 81 429  
E-Mail: [vertrieb-professional@miele.at](mailto:vertrieb-professional@miele.at)  
Miele im Internet: [www.miele.at/professional](http://www.miele.at/professional)  
Kundendienst 050 800 390  
(Festnetz zum Ortstarif; Mobilfunkgebühren abweichend)

**Luxemburg:**

Miele S.à.r.l.  
20, rue Christophe Plantin  
Postfach 1011  
L-1010 Luxemburg/Gasperich

Telefon: 00352 4 97 11-30 (Kundendienst)  
Telefon: 00352 4 97 11-45 (Produktinformation)  
Mo-Do 8.30-12.30, 13-17 Uhr  
Fr 8.30-12.30, 13-16 Uhr

Telefax: 00352 4 97 11-39  
Miele im Internet: [www.miele.lu](http://www.miele.lu)  
E-Mail: [infolux@miele.lu](mailto:infolux@miele.lu)